

ISTRUZIONI DI PULIZIA PER PORTATORI DI LENTI A CONTATTO

Segui questi consigli per mantenere il comfort delle tue lenti a contatto e ridurre il rischio di infezioni

Applicazione e rimozione



Lavati le mani
prima di
manipolare le lenti



Usa un
asciugamano
pulito



Mantieni l'area
dove indossi le
lenti pulita

Manutenzione delle lenti riutilizzabili



Strofina
delicatamente le lenti
con la soluzione



Risciacqua le lenti
con la soluzione



Usa sempre
soluzione fresca
anche conservare
le lenti

Contenitore porta-lenti



Pulisci il
contenitore
porta-lenti con la
soluzione



Tamponalo con un
fazzoletto pulito



Lascialo asciugare
all'aria sottosopra